

*Izsargājieties dabiski*  
Lady-Comp – inteligēnts auglības noteikšanas dators



**LADY-COMP®**

# Lady-Comp uzraudzīs Jūsu auglību.

**99.3% drošs un efektīvs no pirmās lietošanas dienas.**

## Programma

Katras sievietes menstruālajā ciklā ir tikai 6 dienas, kuru laikā viņa var palikt stāvoklī: piecas dienas pirms ovulācijas un ovulācijas dienā. Lady-Comp, pamatojoties uz rīta temperatūras mērījumiem, ko mēra zem mēles, nosaka auglīgās dienas Jūsu individuālajā ciklā. Ovulācijas diena tiek noteikta, saglabājot un analizējot menstruālā cikla datus.



## Tik vienkārši!

- 1** Mēriet temperatūru zem mēles katru rītu!
- 2** Ievadiet informāciju par menstruācijām dienās, kad tās notiek!
- 3** Lady-Comp izvērtē datus un nosaka auglības stāvokli nākošajām 24h:

- = Neauglīga      ● = Mācīšanās fāze  
● = Auglīga      ☀ = Ovulācija

## Ticamība ir vissvarīgākā.

Lady-Comp Pearl indekss ir 0.7 jeb tā efektivitāte ir 99.3%. Tas nozīmē, ka cikla dators ir drošs, precīzs un vienkārši lietojams.

## Auglības kalendārs un statistika.


Ar auglības kalendāru un statistikas datiem Jūs iegūstat vērtīgu informāciju par savu menstruālo ciklu:

- Pagājušās un nākotnes auglības stāvoklis;
- Menstruāciju prognoze nākamajiem mēnešiem;
- Cikla un luteālās fāzes garums;
- Temperatūras likne un temperatūras kāpums pēc ovulācijas;
- Ovulācijas diapazons;
- Varat ērti apskatīt cikla informāciju Lady-Comp vai datorā.

## Jauninājumi.

Jūs varat ērti un viegli papildināt Lady-Comp ar bērniņa plānošanas programmatūru Lady-Comp baby, izmantojot SD karti.

# Medicīnas pamati.

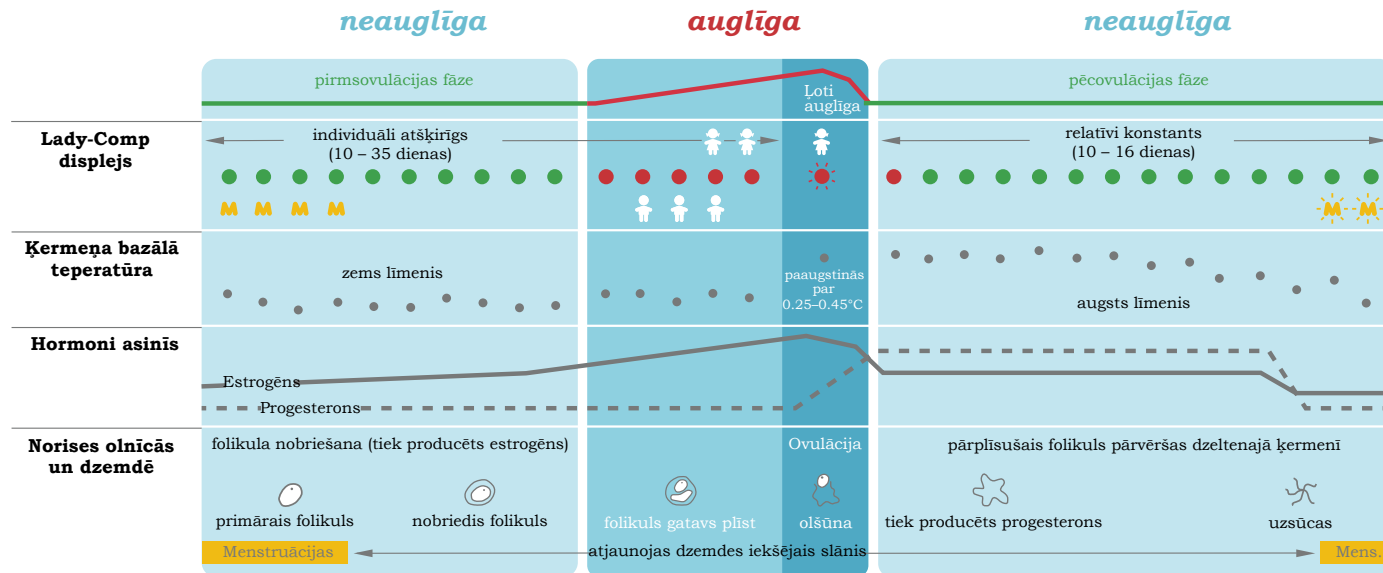

## Bioloģiskie fakti:

- Katrai sievietei ovulācija notiek vienu reizi viena cikla ietvaros.
- Retos gadījumos viena cikla ietvaros var notikt vairākas ovulācijas, tad tās notiek 24h laikā.
- Olšūna var tikt apauglota ne vēlāk kā 18h pēc ovulācijas.

- Sperma sievietes ķermenī var saglabāties aktīva un auglīga maksimums 5 dienas.

## Tas nozīmē, ka:

katrā ciklā ir tikai sešas dienas, kurās ir iespējams palikt stāvoklī: ovulācijas dienā un piecas dienas pirms tās.

## Lady-Comp zina:

Lady-Comp programma ietver bioloģiskos faktus, kas kopā ar Jūsu cikla datiem sniedz uzticamu un drošu informāciju par Jūsu auglību - kad esat auglīga, kad nē.

# Vairāk informācijas:

[www.ladycomp.lv](http://www.ladycomp.lv)

[www.lady-comp.de](http://www.lady-comp.de)



**DEVELOPEMENT, MANUFACTURING  
WORLDWIDE DISTRIBUTION**

 VE Valley Electronics  
GmbH Breite 2  
82418 Murnau/Germany  
Tel.: +49 (0) 8841 48928-0  
Fax: +49 (0) 8841 48928-24  
[info@lady-comp.de](mailto:info@lady-comp.de)  
[www.lady-comp.de](http://www.lady-comp.de)

**VE Valley Electronics pārstāvis  
Lietuvā, Latvijā, Igaunijā**

SIA "Pro Natural"  
Robežu 46,  
Rīga, LV-1004  
Latvija  
Tel.: +371 67461611  
[info@ladycomp.lv](mailto:info@ladycomp.lv)  
[www.ladycomp.lv](http://www.ladycomp.lv)