

Izsargājieties dabiski!

Lady-Comp basic – inteligents cikla dators



LADY-COMP® basic

Lady-Comp basic – dabisks un drošs

99.3% drošs un efektīvs jau no pirmās lietošanas dienas

Programma

Katras sievietes menstruālajā ciklā ir tikai 6 dienas, kuru laikā viņa var palikt stāvoklī: piecas dienas pirms ovulācijas un ovulācijas dienā. Lady-Comp basic, pamatojoties uz rīta temperatūras mērījumiem, ko mēra zem mēles, nosaka auglīgās dienas Jūsu individuālajā ciklā. Ovulācijas diena tiek noteikta, saglabājot un analizējot menstruāla cikla datus.

Tas ir tik vienkārši!

- 1** Mēriet temperatūru zem mēles katru rītu!
- 2** Ievadiet informāciju par menstruācijām dienās, kad tās notiek!
- 3** Lady-Comp basic izvērtēs ievadītos datus un aprēķinās Jūsu auglības stāvokli nākamajām 24 stundām:

● = Neauglīga ● = Macību fāze

● = Auglīga ☀ = Ovulācija

Ticamība ir vissvarīgākā

Lady-Comp Pearl indekss ir 0.7 jeb tā precizitāte ir 99.3%. Tas nozīmē, ka cikla dators ir drošs, precīzs un vienkārši lietojams.


Perla indekss ir mērvienība, kas tiek lietota medicīnas nozarē, lai noteiktu kontracepcijas metodes efektivitāti. Piemēram, ja 100 sievietes vienu gadu lieto kādu vienu konkrētu kontracepcijas metodi un viena no viņām paliek stāvoklī, tad šīs kontracepcijas metodes Perla indekss ir 1.0.

Jauninājumi

Ja vēlaties veikt programmatūras uzlabojumus vai pievienot vairāk funkciju, jūs varat to darīt jebkurā laikā, izmantojot SD karti.



Medical basics.

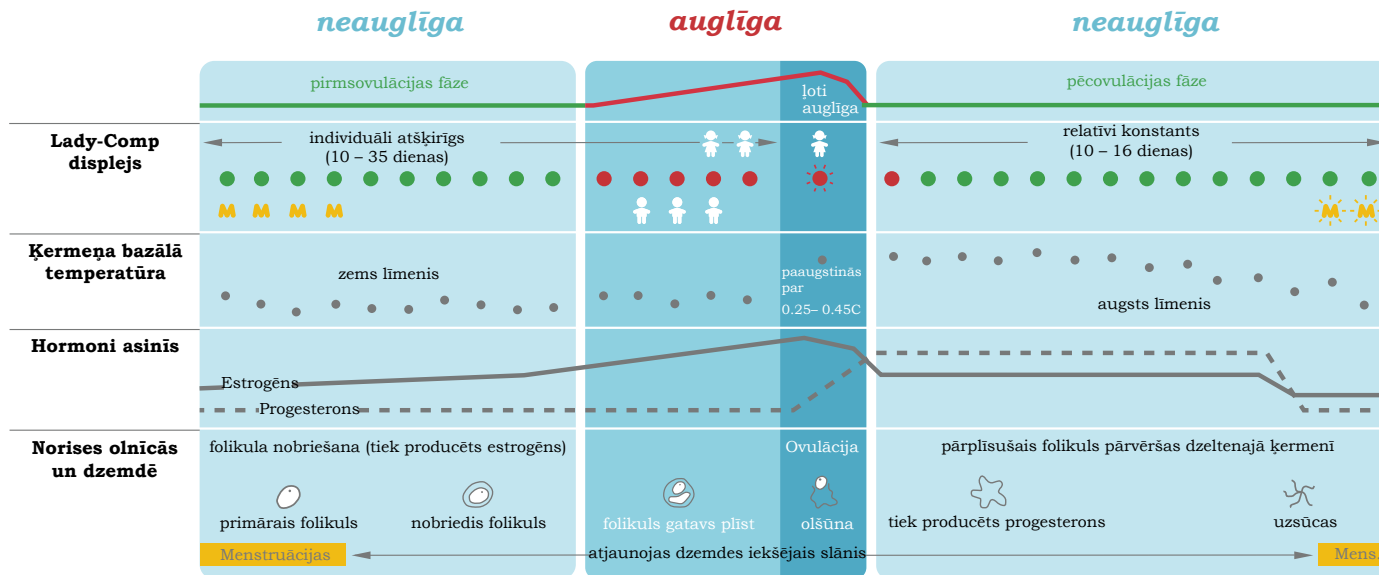

Bioloģiski fakti:

- Katrai sievietei ovulācija notiek vienu reizi viena cikla laikā.
- Retos gadījumos viena cikla laikā var notikt vairākas ovulācijas, tad tās notiek 24 h intervālā.
- Olšūna var tikt apauglota ne vēlāk kā 18 stundas pēc ovulācijas.
- Sperma sievietes ķermenī var saglabāties aktīva un auglīga maksimums 5 dienas.

Tas nozīmē, ka:

katrā ciklā ir tikai šēsas dienas, kurās ir iespējams palikt stāvoklī: ovulācijas dienā un piecas dienas pirms tās.

Lady-Comp basic zina

Lady-Comp basic izmanto bioloģiskos datus un informāciju par Jūsu individuālo ciklu, lai sniegtu uzticamu un drošu informāciju par Jūsu auglību.

Vairāk informācijas:

www.ladycomp.lv

www.lady-comp.de



**DEVELOPEMENT, MANUFACTURING
WORLDWIDE DISTRIBUTION**

 VE Valley Electronics
GmbH Breite 2
82418 Murnau/Germany
Tel.: +49 (0) 8841 48928-0
Fax: +49 (0) 8841 48928-24
info@lady-comp.de
www.lady-comp.de

**VE Valley Electronics pārstāvis
Lietuvā, Latvijā, Igaunijā**

SIA "Pro Natural"
Robežu 46,
Rīga, LV-1004 Latvija
Tel.: +371 67461611
info@ladycomp.lv
www.ladycomp.lv