

# **ЕСТЕСТВЕННЫЙ И НАДЕЖНЫЙ**

*Pearly. Интеллективный компьютер цикла*



**pearly**<sup>®</sup>

# Pearly. Познай себя!

На основании измерения температуры под языком по утрам Pearly определяет плодные дни в Вашем индивидуальном цикле. День овуляции определяется, сохраняя и анализируя данные менструального цикла. Pearly содержит базу данных из сотен тысяч менструальных циклов женщин и применяет биоматематическое прогнозирование, а также новейшие компьютерные технологии.



## **Никаких гормонов = никаких побочных эффектов**

Забеременеть можно только шесть дней в каждом цикле – в день овуляции и в течение 5 дней до нее. Это сравнительно короткий период. Неужели из-за этих дней стоит загружать организм употреблением гормональных препаратов в течение всего цикла? Мы считаем – НЕТ!

# Надежный и простой

**1** Измеряйте температуру каждое утро, размещая термический сенсор под языком на 30-60 секунд!

**2** Простым нажатием кнопки Вы можете ввести информацию о днях менструации, когда они наступили.

**3** Pearly оценит введенную Вами информацию и покажет зеленый или красный свет на ближайшие 24 часа:

 = Неблудна

 = Учебная фаза

 = Плудна

 = Овуляция

**Эффективность, которая помещается в любой сумочке**

Pearly действительно невелик – 7x 10 см. Он поместится в любой женской сумочке.

Работает на батарейках. Идеально подходит женщинам в пути.

**Достоверность превышает всего**

Pearly – новейший продукт среди компьютеров Lady-comp classic (2004-й год). В ходе многочисленных тестов аппарат продемонстрировал Индекс Перля до 1.0, то есть его точность составляет как минимум 99%.

Индекс Перля – это единица измерения, которая применяется в медицине, чтобы установить эффективность метода контрацепции. Например, если 100 женщин в течение одного года используют конкретный метод контрацепции, и одна из них беременеет, Индекс Перля для данного метода контрацепции составляет 1.0.

